

CLINIC DIRECT GRAVIDITETSTEST


Brugsanvisning:

Med CLINIC DIRECT kan man allerede på et tidligt tidspunkt af graviditeten konstatere svangerskabshormonet hCG i urinen.

Fordelene ved CLINIC DIRECT:

- ENDNU LETTERE** ▶ testspidsen kan holdes direkte ind i urinstrålen
- ENDNU MERE ENTYDIG** ▶ resultatet kan ses direkte på teststrippen
- HURTIG** ▶ resultatet kan ses efter kun 3-5 minutter
- STRAKS** ▶ kan udføres allerede på førstedagen for menstruationens udebliven og på alle tider af døgnet
- SIKKER** ▶ ved korrekt anvendelse sammenlignelig med en laboratorietest
- MILJØVENLIG** ▶ ingen overflødige plastdele

- 1 Tag testhæftet ud af folien. Den lille pose (stof der optager fugtighed) skal ikke bruges.
- 2 Åbn hæftet, fold forsiden helt om på bagsiden, og "lås" som vist på billedet. Undgå at berøre testspidsen med fingrene.
- 3 Hold testhæftets spids ind midt i urinstrålen i mindst 6 – 8 sekunder.
ELLER
Alternativt kan man også dykke testhæftets spids ned i en beholder med urinprøven i mindst 15 sekunder. Den beholder, som bruges, bør være ren og tør.
- 4 Læg derefter det åbne hæfte med teksten opad på et underlag.

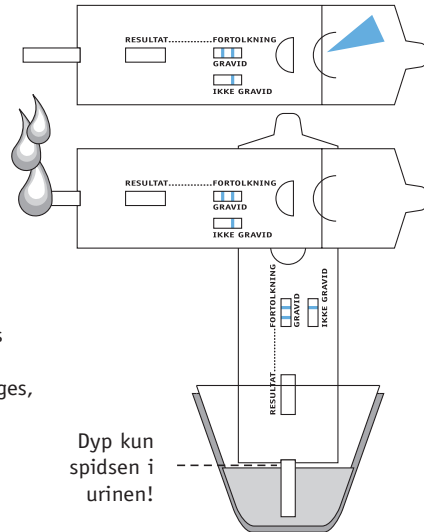

Resultatet efter 3-5 minutter

IKKE GRAVID



Hvis resultatvinduet kun viser 1 rød linje (kontrollinje), kan du gå ud fra, at du ikke er gravid.



GRAVID



Hvis resultatvinduet viser 2 røde linjer, kan du gå ud fra, at du er gravid. Også selv om en af de to linjer er meget svag, kan du gå ud fra, at du er gravid.

De to linjer kan være af forskellig farvenuance og tykkelse. Dette er normalt! Hvis du efter 5 minutter ikke er sikker på resultatet, aflæs testen igen efter endnu 5 minutter. Ofte forstærkes linjens farve i den tid, så aflæsningen af testen bliver lettere.



CLINIC DIRECT GRAVIDITETSTEST

Spørgsmål og svar:

Hvordan virker testen?

CLINIC DIRECT er en urintest, som påviser svangerskabshormonet hCG i urinen. Kroppen producerer hCG, som kan påvises i urinen, når graviditeten er opstået. Med CLINIC DIRECT kan man allerede påvise hormonet på førstedagen for menstruationens udebliven.

Fra hvilket tidspunkt kan man anvende CLINIC DIRECT graviditetstesten?

CLINIC DIRECT kan allerede anvendes på førstedagen for menstruationens udebliven.

Skal man bruge morgenurin?

Nej, CLINIC DIRECT er så følsom, at den kan påvise hormonet hCG i urinen på alle tider af døgnet.

Hvor sikker er testen?

Ved korrekt anvendelse er testen lige så sikker som en laboratorietest.

Hvad betyder kontrollinjen?

Kontrollinjen viser, at testen har optaget en tilstrækkelig mængde urin, og at testen således fungerer korrekt. Hvis der ikke fremkommer nogen linje, bør man gentage testen med en ny test.

Kan indtagelse af medicin eller alkohol påvirke resultatet?

Alkohol har ingen indflydelse på testen. Kun få medikamenter, nærmere betegnet dem, der indeholder hCG, kan påvirke resultatet. Andre lægemidler, som f.eks. smertestillende medicin, antibiotika eller p-piller har generelt ingen indflydelse på testresultatet.

Hvad gør jeg, når resultatet viser, at jeg er gravid?

Kontakt under alle omstændigheder egen læge for at tale med denne om hensigtsmæssige forholdsregler for det videre forløb af graviditeten.

Hvad gør jeg, når resultatet viser, at jeg ikke er gravid?

Hvis resultatet er negativt og menstruationen fortsat udebliver, skal man ligeledes kontakte egen læge.

Andre spørgsmål:

Ring til Unigroups kundeservice, 70 22 28 18, eller se på www.unigroup.dk.

Emballagen og CLINIC DIRECT graviditetstest er miljøvenlige. Der er givet afkald på overflødige plastdele (som f.eks. en skål til urinprøven).

Bemærk!

- Ikke til indvortes brug
- Materiale ikke inkluderet i pakningen: ur til tidstagnung samt evt. en ren og tør kop
- Nogle af de anvendte materialer (f.eks. antistoffer) er potentielt smittefarlige materialer, men det er ikke farligt, hvis testen anvendes ifølge denne instruktion.
- Opbevares utilgængeligt for børn!
- Undlad at bruge testen, hvis emballagen er beskadiget!
- Undlad at bruge testen, hvis holdbarhedsdatoen er overskredet!
- Brugt test bortskaffes med dagrenovationen!



LOT Lot nummer	Udlobsdato	IVD Kun til in vitro diagnostik	Til engangsbrug	Se "Bemærk" i brugsanvisningen	Læs brugsanvisningen før brug	2°C -30°C Opbevares ved 2-30°C	Producent
-------------------	------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	-----------

Tekniske data:

Produkt navn: CLINIC DIRECT graviditetstest. **Virksomme stoffer:** Monoklone antistoffer mod hCG. **Undersøgelsesmateriale:** Frisk, human urin; ingen forbehandling; ingen opbevaring. **Anvendelsesformål:** In vitro diagnostikum til hjemmebrug til påvisning af hCG i urin. **Effektkendetegn:** Nedre påvisningsgrænse: 25 mIU hCG/mL. Måleområde: 20 mIU hCG/mL – 600 IU hCG/mL. Diagnostisk sensitivitet: 100 %. Diagnostisk specificitet: 100 %. **Opbevaring:** I originalemballage ved stuetemperatur (+4 til +30°C). Efter åbning af emballagen bør testen udføres omgående. **Påvisningsmetode:** Vha. kapilarkræfter opsuges den testen påførte urin i testen. Hvis hCG er tilstede i urinen, sker der en immunologisk reaktion mellem hCG og antistofferne i testen, idet der dannes en rød linje (testlinje). Overskydende antistoffer danner kontrollinjen, som viser, at testen fungerer korrekt. Metoden betegnes som immunkromatografi. **Producent:** SERATEC, Gesellschaft für Biotechnologie GmbH, Ernst-Rustrat-Str. 5 D-37079 Göttingen, Tyskland. **Distributør:** Unigroup ApS, Diplomvej 373, 2800 Lyngby, Danmark. **Pakning:** 1 eller 2 stk. tests. **Information opdateret:** 03/2002

