

CLINIC DIRECT RASKAUSTESTI


Käyttöohje:

CLINIC Direct – raskaustesti näyttää jo raskauden alkuvaiheessa hCG:n määrän virtsassa.

CLINIC Direct – raskaustestin hyvät puolet:

- HELPOMPI** ▶ testi voidaan ottaa suoraan virtsasuihkusta
- SELVEMPI** ▶ testin tulos luetaan suoraan testiliuskasta
- NOPEA** ▶ testin tulos voidaan lukea 3-5 minuutin kuluttua
- HETI** ▶ testiä voidaan käyttää jo ensimmäisenä päivänä kuukautisten pois jäännin jälkeen ja testi voidaan tehdä minä vuorokauden aikana hyvänsä
- VARMA** ▶ oikein käytettynä yhtä varma kuin laboratoriotesti
- YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN** ▶ ei tarpeettomia muoviosia

- 1 Ota testi foliopakkauksesta. Kosteutta imevä pussi heitetään pois.
- 2 Taita pahvikansi auki ja kiinnitä se takapuolella olevan ulokkeen alle (ks kuva). Vältä koskettamasta testin kärkeä sormin.
- 3 Pidä testin kärkeä virtsasuihkussa vähintään 6–8 sekuntia.
TAI
Testin kärjen voi myös kastaa virtsanäytteeseen vähintään 15 sekunniksi. Käytettävän astian tulee olla puhdas ja kuiva.
- 4 Aseta avoin testiliuska tasaiselle alustalle tekstipuoli ylöspäin.

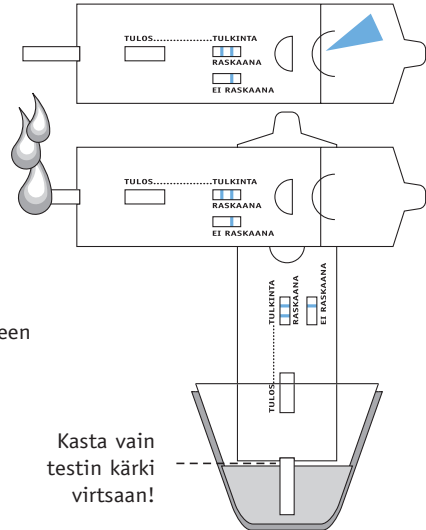

Tulos 3-5 minuutin kuluttua

EI RASKAANA

Jos testiin tulee vain 1 punainen viiva (kontrolliviiva), et ole raskaana.



RASKAANA

Jos testiin tulee 2 punaista viivaa, olet raskaana. Vaikka toinen viivoista olisi hyvin heikko, tarkoittaa tulos, että olet raskaana.

Viivat voivat olla eri paksuisia ja eri sävyisiä väriltään. Se on täysin normaalia. Jos et 5 minuutin kuluttua ole täysin varma tuloksesta, odota vielä toiset 5 minuuttia ja tarkista tulos uudelleen. Usein viivan väri vahvistuu tässä ajassa ja testin tuloksen lukeminen on silloin helpompaa.

CLINIC DIRECT RASKAUSTESTI

Kysymyksiä ja vastauksia:

Miten testi toimii?

CLINIC Direct mittaa virtsassasi olevan hCG:n (Human Chorionic Gonadotropin -raskaushormonin) määrän. hCG on proteiini, jota kehittyvä istukan soluissa ja jota erittyy virtsaan heti raskauden alkuvaiheessa. CLINIC Direct -testi tunnistaa raskaushormonin jo ensimmäisenä päivänä kuukautisten pois jäännin jälkeen.

Milloin CLINIC Direct -raskaustestiä voi aikaisintaan käyttää?

CLINIC Direct -testiä voi käyttää jo ensimmäisenä päivänä kuukautisten pois jäännin jälkeen.

Täytyykö testi tehdä aamuvirtsasta?

Ei. CLINIC Direct on niin herkkä, että se tunnistaa hCG -hormonin virtsassa kaikkina vuorokauden aikoina.

Miten varma raskaustesti on?

Oikein käytettynä testi on aivan yhtä varma kuin laboriotesti.

Mitä kontrolliviiva tarkoittaa?

Kontrolliviiva osoittaa, onko testiin tullut riittävästi virtsaa, niin että testi toimii virheettömästi. Jos yhtään viivaa ei ilmesty näkyviin, tulee testi tehdä uudelleen käyttämällä uutta testiä.

Voivatko lääkkeet tai alkoholi vaikuttaa testitulokseen?

Alkoholilla ei ole mitään vaikutusta testitulokseen. Ainoastaan erityiset lapsettomuuden hoidossa käytettävät hCG -hormonia sisältävät lääkkeet voivat vaikuttaa tulokseen. Muut lääkkeet, kuten esim. kipulääkkeet, antibiootit tai E-pillerit eivät yleensä vaikuta testitulokseen.

Mitä teen kun testi näyttää, että olen raskaana?

Ota yhteys lääkäriin tai äitiysneuvolaan, jotka voivat neuvoa, mitä sinun tulee tehdä.

Mitä teen kun testi näyttää, että en ole raskaana?

Jos testituloks on negatiivinen ja kuukautisesi jäävät edelleen pois, tulee sinun ottaa yhteyttä lääkäriin.

Lisäkysymykset:

Soita Unigroupin asiakaspalveluun numeroon 0800-114021 tai katso www.unigroup.dk

Sekä CLINIC Direct pakkaus että itse testi ovat ympäristöystävällisiä. Olemme halunneet välttää tarpeettomia muoviosia (kuten esim. astia virtsanäytteelle).

Huom!

- Ei sisäiseen käyttöön
- Lisäksi tarvitaan seuraavia apuvälineitä: kello sekä tarvittaessa puhdas ja kuiva muki tai kuppi
- Jotkut käytetyistä aineista (esim. vasta-aineet) ovat mahdollisia tartunta-aineita, mutta ne eivät ole vaarallisia, jos seurataan tarkoin tämän testin käyttöohjetta.
- Ei lasten ulottuville!
- Älä käytä testiä, jos pakkaus on vahingoittunut!
- Älä käytä testiä, jos myyntipäivä on vanhentunut!
- Käytetty testi heitetään roskiin!



LOT Lot numero	Parasta ennen päiväys	Ainoastaan in vitro-diagnostiikkaan	Kertakäyttöinen	Katso "Huomaa" käyttöohjeessa	Lue käyttöohje ennen käyttöä	Säilytetään 2-30°C-asteessa	Valmistaja
-------------------	-----------------------	-------------------------------------	-----------------	-------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------

Tekniset tiedot:

Tuotteen nimi: CLINIC Direct raskaustesti. **Vaikuttavat aineet:** Monoklonaaliset vasta-aineet hCG:tä vastaan. **Tutkittava aine:** Tuore ihmisvirtsa; ei esikäsitellyä; ei säilytystä. **Käyttötarkoitus:** In vitro diagnostiikka kotikäyttöön. Mittaa hCG:n virtsassa. **Suoritusarvot:** Herkkyyssarvo: 25 mIU hCG/ml. Mittausala: 20 mIU hCG/ml – 600 IU hCG/ml. Diagnostinen herkkyys: 100 %. Diagnostinen spesifiteetti: 100 %. **Säilytys:** Alkuperäisessä pakkauksessa huoneenlämmössä (+4 - +30°C). Pakkauksen avaamisen jälkeen testi tulee tehdä välittömästi. **Testimenetelmä:** Virtsa imeytyy kapillaarivoiman avulla testiin. Jos virtsassa on hCG:tä, hCG:n ja vasta-aineiden kesken tapahtuu immunologinen reaktio, joka ilmenee punaisena viivana (testiviivana). Yli jääneet vasta-aineet muodostavat kontrolliviivan, joka näyttää, että testi toimii virheettömästi. Menetelmä luonnehditaan immuunikromatografiaksi. **Valmistaja:** SERATEC, Gesellschaft für Biotechnologie GmbH, Ernst-Rustrat-Str. 5 D-37079 Göttingen. **Markkinoija:** Unigroup ApS, Diplomvej 373, DK-2800. **Pakkaus:** 1 tai 2 testiä. **Tieto päivitetty:** 03/2002