

Läs bruksanvisning ordentligt.

## CLINIC DIRECT GRAVIDITETSTEST


### Bruksanvisning

Med Clinic Direct kan man redan tidigt under graviditeten mäta hormonet hCG i urinen.

#### Fördelar vid CLINIC DIRECT:

- LÄTT** ▶ Testspetsen kan hållas direkt i urinen
- TYDLIGT** ▶ Resultatet kan läsas direkt på testremsan
- SNABBT** ▶ Resultatet kan ses efter 3-5 minuter
- OMEDELBART SVAR** ▶ Kan utföras redan dagen efter du förväntar din menstruation och när som helst på dagen
- SÄKERT** ▶ Vid korrekt användning är Clinic Direct lika säkert som de tester som utförs av laboratorier
- MILJÖVÄNLIGT** ▶ Inga onödiga plastdelar

- 1 Ta testhäftet ut av folien.  
Den fuktabsorberande påsen kan du kasta.
- 2 Öppna häftet, vik försidan helt om på baksidan og "lås" som bilden visar.  
Undvik att röra testspetsen med fingrarna.
- 3 Håll testhäftets spets i urinstrålen i minst 6-8 sekunder.  
**ELLER**  
Alternativt kan man samla urin i ett rent och torrt kärl. Placera testhäftets spets i urinen i minst 15 sekunder.
- 4 Lägg det öppna häftet med texten uppåt på en plan yta.

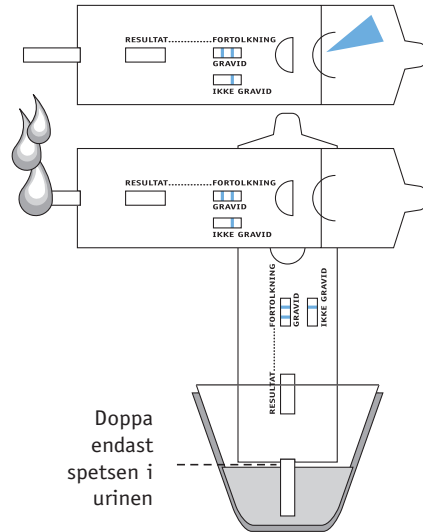

#### Resultatet efter 3-5 minuter

##### INTE GRAVID

Om det endast visas ett rött streck i resultatfönstret (kontrolstreck) är du inte gravid.

##### GRAVID

Om det visas två röda streck i resultatfönstret är du gravid, också om ett av de strecken är svag.

Det ena strecket kan vara tydligare och ha olika färgnyanser än det andra. Detta är normalt.  
Om du efter 5 minuter är osäker på resultatet, avläs testet igen efter 5 minuter.  
Ofta blir avläsningen lättare efter ett tag, eftersom färgerna blir starkare.



# CLINIC DIRECT GRAVIDITETSTEST

## Frågor och svar:

### Hur fungerar testet?

CLINIC DIRECT är ett urintest, som visar om din urin innehåller hCG. Redan i början av graviditet börjar placantan (moderkakan) utvecklas och producera hCG. Clinic Direct visar hormonet redan dagen efter då menstruation burde ha börjat.

### När kan Clinic Direct graviditetstest utföras?

Du kan använda Clinic Direct från första dagen du har gått över tiden.

### Är det nödvändigt att testet utförs uttryckligen på morgonurin?

Nej, Clinic Direct är så känsligt, att det kan upptäcka hCG –hormon i urinen vilken tid på dygnet som helst.

### Hur pålitligt är testet?

Vid korrekt bruk är testet lika säkert som ett laboratorietest.

### Vad betyder kontrolstrecket?

Kontrolstrecket visar, att testet har upptagit en tillräcklig mängd urin och att testet fungerar korrekt. Om inget streck framkommer, så skall man göra ett nytt test.

### Kan läkemedel eller alkohol påverka resultatet?

Alkohol har ingen inverkan på resultatet. Endast hormonpreparat som innehåller hCG kan påverka resultatet. Andra läkemedel, till exempel värktabletter, antibiotika eller p-piller påverkar inte testresultatet.

### Testet visar att jag är gravid, vad skall jag göra?

Du bör kontakta din läkare eller mödrarådgivning som kommer att diskutera din graviditet med dig och förklara vad du ska göra.

### Testet visar att jag inte är gravid, vad skall jag göra?

Om resultatet är negativt och menstruation ändå uteblir, bör du kontakta din läkare.

### Andra frågor:

Ring till Unigroups kundservice: 0800-114021 eller se på [www.unigroup.dk](http://www.unigroup.dk)

Förpackningen och Clinic Direct graviditetstest är miljövänliga. Vi undviker användning av onödiga plastdelar (som t.ex. urinbehållare).

### OBSERVERA!

- Inte för internt bruk
- Ytterligare behövs följande material: en klocka och vid behov en ren och torr kopp eller mugg
- Några av material, som används (t.ex. anti-kroppar) är potentiellt smittsamma material, men de är inte farliga om testet används enligt denna instruktion.
- Förvaras otillgängligt för barn.
- Använd inte testet, om folieförpackningen är trasig.
- Testet bör inte användas efter den angivna sista förbrukningsdagen.
- Brukt test slängas med avfallshandling.



LOT Lot nummer	Bäst före	IVD Endast till in vitro diagnostik	Till engångsbruk	Se "Observera" i bruksanvisningen	Läs bruksanvisningen före bruk	2°C -30°C Bevaras vid 2-30°C	Producent
-------------------	-----------	--	------------------	-----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-----------

### Tekniska upplysningar:

**Produktnamn:** Clinic Direct graviditetstest. **Aktiva komponenter:** Monoklona antistoffer mot hCG. **Undersökningsmateriale:** Färsk human urin; ingen förbehandling; ingen förvaring. **Användningsformål:** In vitro –test för hemmabruk. Ger säkert besked om hCG i urinen. **Effektivitet:** Lägre gräns för utslag: 25mIU hCG/ml. **Mättningsområde:** 20mIU hCG/ml – 600 IU hCG/ml. Diagnostisk sensitivitet: 100%. **Diagnostisk specifitet:** 100%. **Förvaring:** i rumtemperatur (4 – 30°C). Efter öppning av förpackningen bör testet utföras omedelbart. **Bevismetod:** Med hjälp av kapillärkraft sugs urinen upp i testet. Om hCG finns i urinen sker en immunologisk reaktion mellan hCG och antistofferna i testet och ett rött streck (teststreck) framträder. Överskjutande antistoffer skapar kontrolstrecket, som visar att testet fungerar korrekt. Metoden betecknas immunkromatografi. **Producent:** SERATEC, Gesellschaft für Biotechnologie GmbH, Ernst-Rustrat-Str. 5, D-37079 Göttingen, Tyskland. **Distributör:** Unigroup ApS, Diplomvej 373, DK-2800. **Förpackning:** 1 eller 2 stk. test. **Information uppdaterat:** 03/2002

