

Natančno pr eberite
navodila za uporabo

SERATEC® DIRECT

TEST ZA UGOTAVLJANJE NOSEČNOSTI

Navodilo za Uporabo:


S testom za ugotavljanje nosečnosti SERATEC® DIRECT lahko dokazate hormon hCG, ki nastaja že v zgodnjem obdobju nosečnosti.

Prednosti Testa SERATEC® DIRECT:

- ▶ ŠE ENOSTAVNEJE ▶ Konico testnega lista držite neposredno v curek urina.
- ▶ ŠE JASNEJE ▶ Odčitavanje izida neposredno na testnem listu.
- ▶ HITRO ▶ Izid že po 3-5 minutah.
- ▶ TAKO JASNO ▶ Izvedljiv že prvi dan po izostanku menstruacije.
- ▶ VARNOST ▶ Ob prvih izvedbi primerljivi v laboratorijskem testu.
- ▶ OKOLJU PRIJAZNO ▶ Brez nepotrebnih delov testov iz umetne mase.

Navodilo:


- 1** S testnega lista odstranite zaščitno folijo. Priložene vrečke s sušilnim sredstvom ne potrebujete.
- 2** Razgrnite testni list in preloženo konico zataknite v režo, kot prikazuje slika. Testne konice se ne dotikajte s prsti.

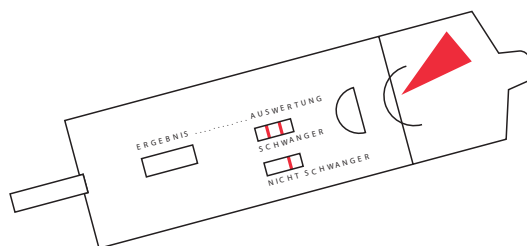

- 3** Konico testnega lista držite najmanj 6-8 sekund v curek iztekajočega urina med mokrenjem.

ALI

Če želite, lahko konico testnega lista pomočite najmanj za 15 sekund v posodo z vzorcem urina. Posoda mora biti pred uporabo čista in suha.

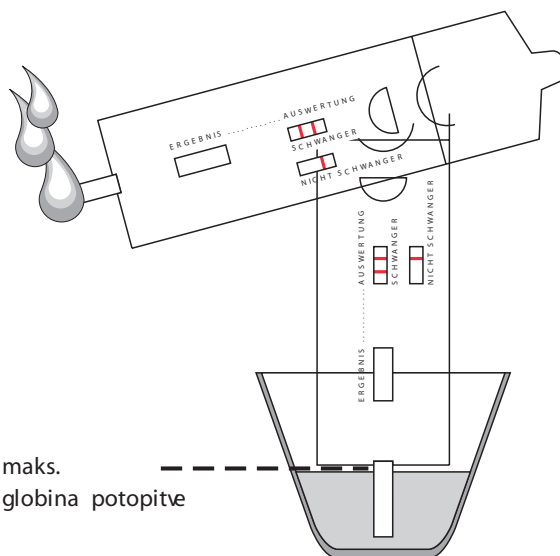

- 4** Položite razgrnjen list z napisom navzgor na ravno podlago.

IZID PO . . . 3-5 MINUTAH



Če se v okencu pojavi samo ena rdeča črta (= kontrolna črta), najverjetneje niste noseči.



Če se v okencu pojavita dve rdeči črti, lahko domnevate, da ste noseči. Če je ena od obeh črt šibkejša barve, ste najverjetneje noseči.



Obe črti sta lahko različno močno obarvani in široki. To je povsem običajno! V primeru, da ste po odčitavanju izida po 5 minutah še vedno negotovi, preverite izid po nadaljnjih 5 minutah. Pogosto se črta v tem času še dodatno obarva, tako da je odčitavanje izida še enostavnejše.



Če se rdeča črta sploh ne pojavi, test verjetno ni bil pravilno izveden. Pazljivo ponovite postopek z novim testnim trakom.

SERATEC® DIRECT

TEST ZA UGOTAVLJANJE NOSEČNOSTI

Vprašanja in odgovori:

Kako test deluje?

Nosečniški test SERATEC® DIRECT je urinski test, ki pokaže prisotnost nosečnega hormona hCG v urinu. Telo v času nosečnosti proizvaja hormon hCG, ki ga lahko dokažemo v urinu. Z nosečnim testom SERATEC® DIRECT lahko hormon dokažete že prvi dan po izostanku menstruacije.

Kdaj lahko uporabo nosečniški test SERATEC® DIRECT?

Nosečniški test SERATEC® DIRECT lahko uporabite že v prvih dneh po izostanku menstruacije.

Ali je potrebno uporabiti jutranji urin?

Ne. Nosečniški test SERATEC® DIRECT je tako občutljiv, da zazna nosečniški hormon hCG v katerem koli vzorcu urina podnevi ali ponoči.

Kako zanesljivo je test?

Ob pravilni uporabi je zanesljivost testa primerljiva z zanesljivostjo laboratorijskih testov.

Kakšen pomen ima kontrolna črta?

Kontrolna črta kaže, da je bila vsrkana zadostna količina urina in da test pravilno deluje. Če se črta ne pojavi, priporočamo, da test ponovite z novim testnim trakom.

Ali lahko uživanje zdrave hrane ali alkohola vpliva na izid testa?

Alkohol ne vpliva na izid. Le redka zdravila, namreč takšna, ki vsebujejo hCG, lahko vplivajo na izid. Druga zdravila, kot npr. analgetiki, antibiotiki ali kontracepcijske tablete, na splošno ne vplivajo na izid testa.

Kaj storiti, če je izid pozitiven?

V vsakem primeru se posvetujte z vašim zdravnikom in se pogovorite o nadaljnjem poteku nosečnosti.

Kaj storiti, če je izid negativen?

Če je izid negativen in še vedno nimate menstruacije, se pravo tako posvetujte s svojim zdravnikom.

Ovojnina in nosečniški test SERATEC® DIRECT sta okolju prijazna izdelka. Odrekli smo se uporabi odveanih delov iz umetne mase (npr. posodica).

! Opozorila:

- Pozorno preberite navodila za uporabo!
- Shranite nedosegljivo otrokom!
- Testa ne uporabljajte, če je zaščitna folija poškodovana!
- Testa ne uporabljajte po preteku roka uporabe!
- Uporabljen test odvrzite med gospodinjske odpadke!

Tehnični podatki:

Nazi izdelka: Testi za ugotavljanje nosečnosti SERATEC® DIRECT.
Učinkovite sestavine: Monoklonalna protitelesa proti hCG.
Predmet preiskave: Svež, človeški urin; neobdelan; brez strupenosti.
Namen uporabe: Test za dokazovanje prisotnosti hormona hCG v urinu v reagenčni steklenki za domačo uporabo.
Lastnosti: Spodnja meja zazna ve: 25 mIU hCG/ml
Območje zazna ve: 20 mIU hCG/ml - 600 IU hCG/ml
Diagnostična občutljivost: >99%
Diagnostična specifičnost: >99%

Shranjevanje: V originalni ovojnini pri sobni temperaturi (+4 do +30 °C).
Test morate opraviti takoj, ko ste odprli zaščitno folijo.

Metoda dokazovanja: Na test nanese urin se s pomočjo kapilarnih sil vsrka v testni trak. Pri prisotnosti hormona hCG v urinu pride do imunološke reakcije med hormonom hCG in protitelesi, ki se nahajajo v testu, kar sproži nastanek rdeče črte (testne črte). Odveana količina protiteles tvori kontrolno črto, ki kaže pravilno delovanje testa. Metoda se imenuje imunokromatografija.